

M CARBIDE BURS+

医療機器届出番号 09B1X00006003010
 一般医療機器 一般的名称：歯科用カーバイドバー
 (FOR F.G.) 販売名 マニーカーバイドバー



M カーバイドバー+

FOR ADVANCED TREATMENT

高度な治療のために

ROUND

注文番号	M1/4	M1/2	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
ISO番号	001/005	001/006	001/008	001/010	001/012	001/014	001/016	001/018	001/021	001/023

INVERTED CONE

注文番号	M33 1/2	M34	M35	M36	M37
ISO番号	010/006	010/008	010/010	010/012	010/014

TAPER FISHER

注文番号	M169L	M170	M171	M172	MM15EZ	MM14CF	M699	M700	M701	M701X	M701L	M702	M703
ISO番号	171/009	168/010	168/012	168/016	198/015	164/014	168/009	168/010	168/012	168/012	171/012	168/016	168/021

PEAR

注文番号	M245	M330	M331	M332	M330P	M1931
ISO番号	237/009	232/008	232/010	232/012	232/008	237/010

STRAIGHT FISHER

注文番号	M57	M58	M557	M558	M559	M560	M1957
ISO番号	107/010	107/012	107/010	107/012	107/014	107/016	137/010

ROUND END STRAIGHT FISHER

注文番号	M1157	M1158	M1159	M1557	M1558	M1559	M1958	MM21DC
ISO番号	137/010	137/012	137/014	137/010	137/012	137/014	137/012	137/010


OGIVAL FISHER

注文番号	M7901	M7902	M7903	M7408
ISO番号	496/009	496/010	496/012	277/023

ROUND END TAPER FISHER

注文番号	M1970	MM15ZB	MM16DB	MM23DC	MCE/4CF
ISO番号	194/010	199/015	196/016	168/012	166/014

■カーバイドバー形態表の見方

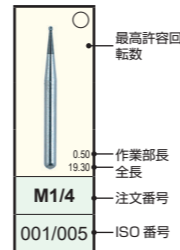

標準価格

○: Iクラス	1,800円(10本入)
△: IIクラス	2,350円(10本入)
◎: IIIクラス	9,200円(10本入)

30万回転	300,000r.p.m
20万回転	200,000r.p.m
15万回転	150,000r.p.m

*1...クrossカット入り ※2...ダイヤカット入り

イラストは、原寸大ではありません。



注意

FG カーバイドバーご使用に際して

●本製品を歯科治療以外の目的には使用しないで下さい。●感染防止の為、使用前に必ず滅菌処理を行って下さい。●ハンドピースメーカーの指示に従って、シャンクを確実に奥まで挿入し、半チャックでないこと、また予め患者の口腔内で回転させて振れがないことを確認し、無負荷で回転させ、定常回転となつてからご使用下さい。●破折防止のために、力を加え過ぎない様に注意し、フェザータッチで断続的に使用して下さい。特に頭部の細い・長い・大きい形状のものは、折れたり曲がったりする可能性がありますので、充分にご注意下さい。●ご使用の際には目の損傷を防ぐ為、保護眼鏡等をご使用下さい。●カーバイドバーの性能維持・目詰まり防止・歯髄炎防止の為、必ず充分な注水下でご使用下さい。●ご使用後は医療用廃棄物として適切な処理をして下さい。●破折の原因となりますので、指定回転数を厳守して下さい。

デザイン・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。



〒321-3231 栃木県宇都宮市清原工業団地8-3
 【デンタル営業】Tel:028-667-8591/Fax:028-667-8593
 Exp.Sec./ Phone:028-667-8592 URL:http://www.mani.co.jp


発売 株式会社モリタ

大阪本社 ■〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3丁目33番18号 Tel:06-6380-2525
 東京本社 ■〒110-8513 東京都台東区上野2丁目11番15号 Tel:03-3834-6161

D05540



折れにくく、切れる設計！ タッチ感に変化

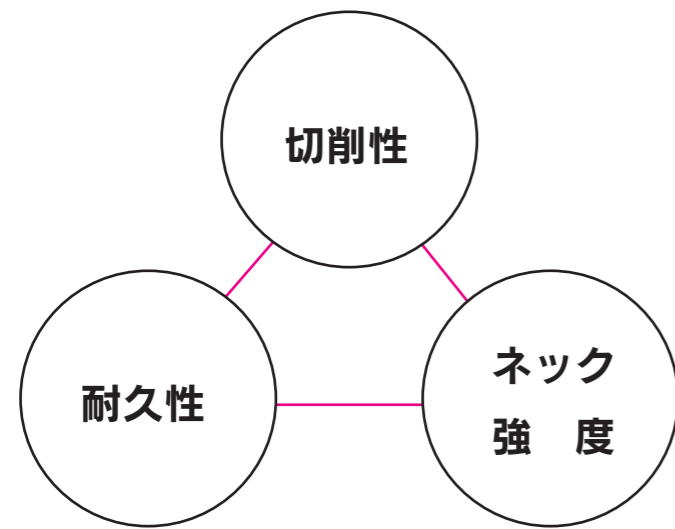

トータルのバランス性を実現

ご使用のポイント

- 1 フェザータッチで十分な切削感が得られます。
- 2 十分な注水により製品性能を最大限に発揮します。

ご使用上の注意点
※ご使用の際には十分な注水をしながらフェザータッチでご使用ください。

■FCK除去



推奨バー
M330P
M330

〈症例提供〉
長崎県平戸市開業 NATURAL TEETH
高崎智也 先生

■コア除去



推奨バー
M1557
M1558
M1931
M1958

■インレー除去





推奨バー
M330P
M330
M1557
M1931
M1970

〈症例提供〉
千葉県千葉市美浜区開業 幕張西歯科医院
池田仁崇 先生





≫ Pick UP



Number
M330

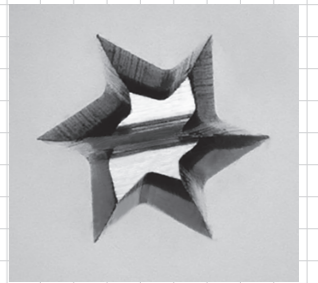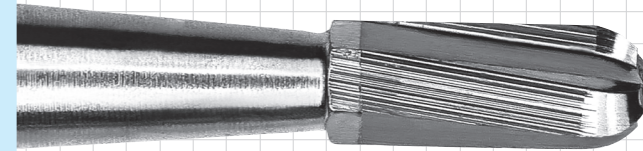



Number
M330P

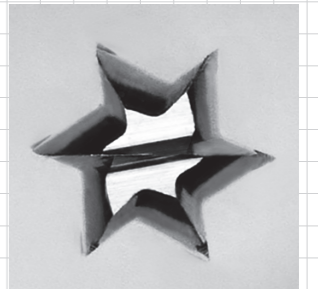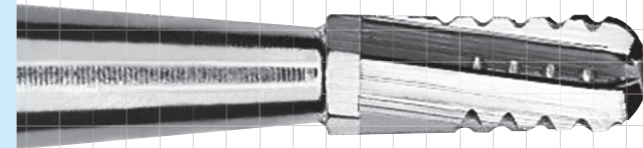

Number
M1557

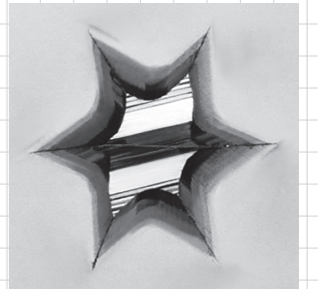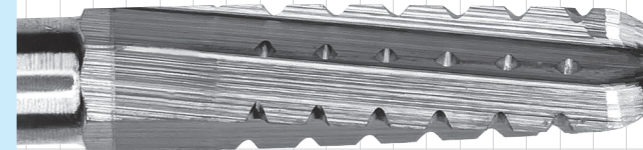


Number
M1958

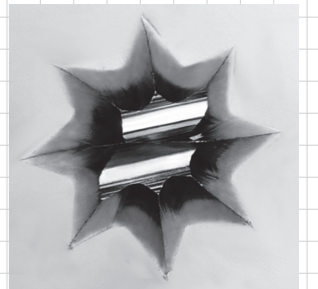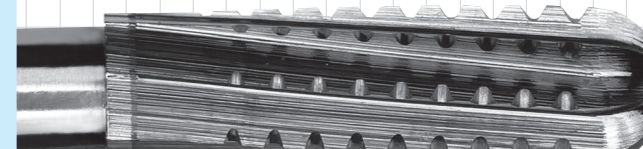


≫ DATA


■ 平均切削量比較 (自社比較)

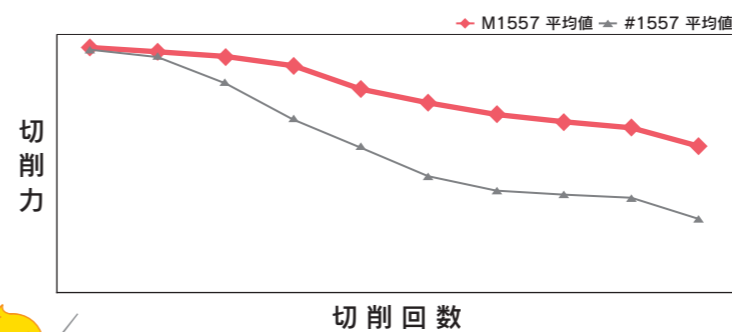

■ 上面刃型比較

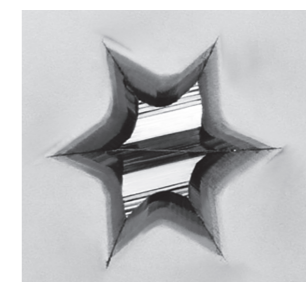

Mカーバイドバー+ M1557

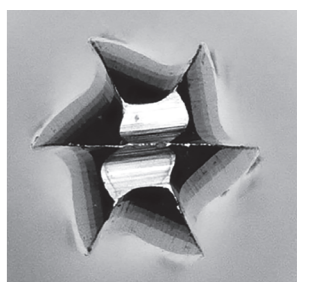

カーバイドバー 1557 (旧タイプ)



※Mカーバイドバー+は、旧タイプと比べて、切削耐久性が向上しています。