




DIA-BURS® Super Coarse
ダイヤモンド® スーパーコース

MANI[®] DIA-BURS[®] Super Coarse ダイヤモンド[®] スーパーコース

医療機器届出番号 09B1X00006002010
一般医療機器 一般的名称: 歯科用ダイヤモンドバー
販売名 マニー[®] ダイヤバー[®]

当社ダイヤモンド[®]での比較

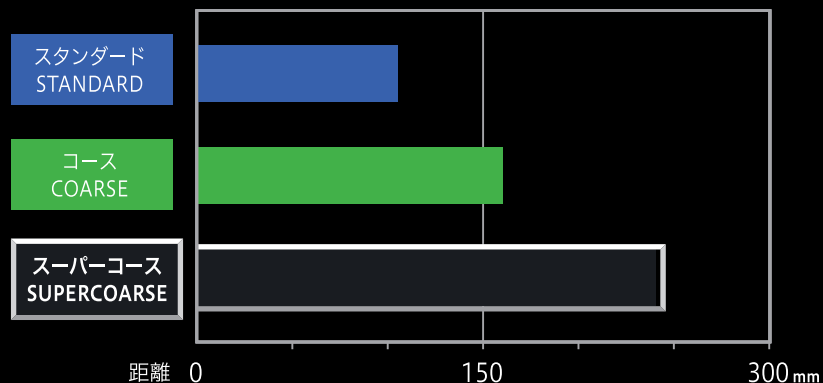

● 許容回転数で切削量を比較したグラフ。
※ 切削対象物: エナメル質と同等の物質



スタンダードを使用するよりも、
治療効率がよくなります。

〈参考写真〉
栃木県宇都宮市開業
やまうち歯科 secondstage: 山内聡先生

- ▶ 治療時間の短縮に!
- ▶ カーバイドバーの代わりとしても有効!
- ▶ ジルコニアの除去に効果的!



ダイヤモンド[®] スーパーコース形態表

形態表の見方

	Super Coarse												
		ISO 039/034	ISO 237/023	ISO 237/034	ISO 257/034	ISO 141/014	ISO 166/018	ISO 173/018	ISO 170/023	ISO 170/018	ISO 198/020	ISO 197/018	
		5.1/19.2	5.3/19.1	5.1/19.1	5.2/19.2	8.3/22.3	10.3/22.1	10.3/21.9	5.6/19.1	4.3/19.1	9.3/21.9	7.3/21.2	
		EX-11SC	EX-21SC	EX-26SC	FO-27SC	SR-11SC	TC-11SC	TF-12SC	TF-22SC	TF-31SC	TR-13SC	TR-21SC	

許容回転数 ▶ 16万回転 160,000min⁻¹ 30万回転 300,000min⁻¹ 45万回転 450,000min⁻¹ 標準価格 1シート 5本入 **4,500円**

注意
ダイヤモンド[®]のご使用に際して

【使用上の注意】●許容回転数を超えた場合には破折して怪我をする恐れがあるので許容回転数を厳守し、フェザータッチで使用する。●本品は歯科用ハンドピースを製造しているメーカーの指示に従ってシャンクを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認する。●頭部が細いもの、長いものあるいは大きいものは、折れや曲がりが生じるほどの角度や加圧下での使用は避けること。●本品を使用する際には、目の損傷を防ぐ為に保護眼鏡などを使用すること。また作業時に発生する粉塵を吸い込まないよう作業時には防塵マスクを着用すること。●ラバーダム等を装着して、落下・誤飲に注意すること。●使用前に口腔外で予備回転を行い、振れがないことを確認すること。●注水下で研削物及び作業部を冷却して使用すること。●使用後は直ちに医療用洗剤とブラシ等を使用して洗浄し、付着した体液・生体組織等の異物を完全に洗い落とすこと。●超音波洗浄器での洗浄は、作業部の劣化を避ける為、スタンド類にセットしてから洗浄すること。●本品はEDTA溶液、次亜塩素酸ナトリウム等の腐食性溶液に長時間浸漬した場合、腐食等の恐れがあるので注意すること。

デザイン・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

製造販売 **マニー株式会社**

〒321-3231 栃木県宇都宮市清原工業団地8番3
【国内営業】 Tel: 028-667-8591 / Fax: 028-667-8593

発売 **株式会社モリタ**

大阪本社 ■ 〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3丁目33番18号 Tel: 06-6380-2525
東京本社 ■ 〒110-8513 東京都台東区上野2丁目11番15号 Tel: 03-3834-6161