



# Vessel Knife

血管ナイフ  
医療機器認証番号 22000BZX01617000  
血管ナイフハンドル  
医療機器届出番号 09B1X00006020010

製造販売元 *alfresa* アルフレッサファーマ株式会社

# 心臓血管外科医が考案した製品です

## 特長

### 血管ナイフ

ブレードの切れ味が優れています。

無理のない操作で冠状動脈を容易に切開することができます。

ブレードは0度と角度付(35度)、ハンドルは0度と角度付(10度)があり、これらの組み合わせにより様々な角度で使用することができます。

### 剥離ブレード

冠状動脈バイパス手術時のグラフト吻合部周辺組織を切開・剥離できるブレードです。

## 「ブレードとハンドルの組み合わせ例」および「推奨切開部位」

### D101 (ブレード35度) とハンドルの組み合わせ例

### 推奨切開部位\*

① D101 (ブレード35度) + H175-0 (0度)  
(ブレード35度を使用する場合の基本)

全ての冠状動脈

② D101 (ブレード35度) + H175-10 (角度付+10度)

4PD (後下行枝), 4AV (房室結節動脈枝)

③ D101 (ブレード35度) + H175-10 (角度付-10度)

LAD (前下行枝), LCX (左回旋枝)

### D100 (ブレード0度) とハンドルの組み合わせ例

### 推奨切開部位\*

④ D100 (ブレード0度) + H175-0 (0度)  
(ブレード0度を使用する場合の基本)

全ての冠状動脈

⑤ D100 (ブレード0度) + H175-10 (角度付+10度)

LAD (前下行枝)

⑥ D100 (ブレード0度) + H175-10 (角度付-10度)

LCX (左回旋枝)


### D500 (剥離ブレード) とハンドルの組み合わせ例

⑦ D500 (ブレード0度) + H175-0 (0度)

※推奨切開部位は参考であり、術者が最適と判断する「ブレードとハンドルの組み合わせ」でご使用ください。


## 血管ナイフ

| 形状  | 製品規格                     | 滅菌方法   | 使用期限        | 入数   | JANコード<br>4987274 |
|---|--------------------------|--------|-------------|------|-------------------|
|  | D100* ブレード(0度)           | E.O.G. | 製造日より<br>3年 | 5入/箱 | 37039-7           |
|  | D101* ブレード(35度)          | E.O.G. | 製造日より<br>3年 | 5入/箱 | 37253-7           |
|  | 剥離ブレード<br>D500* ブレード(0度) | E.O.G. | 製造日より<br>3年 | 5入/箱 | 04244-7           |
|  | H175-0 ハンドル(0度)          | 未滅菌    | —           | 1入/箱 | 37427-2           |
|  | H175-10 ハンドル(角度付)        | 未滅菌    | —           | 1入/箱 | 37577-4           |

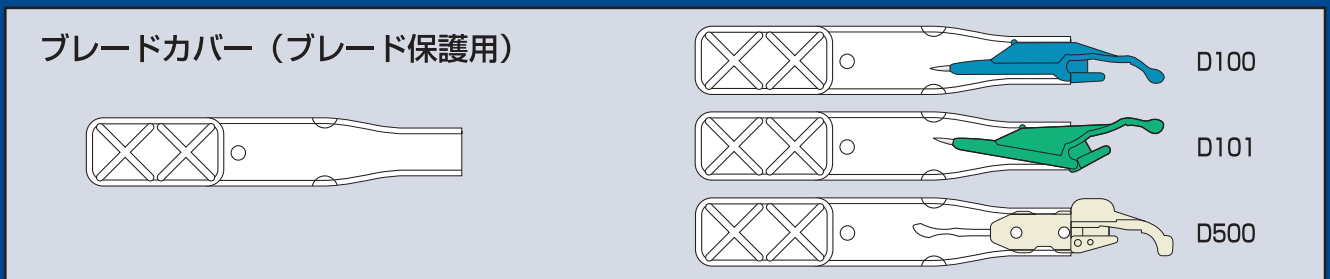


## 取り付け及び取り外し方法

### 取り付け方法

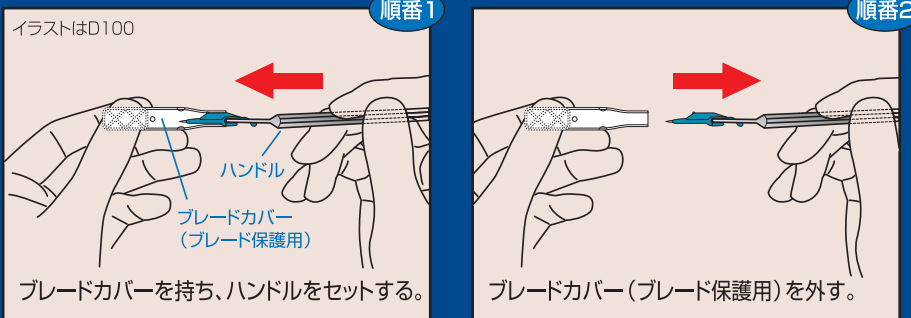


### ブレード(刃)の取り外し方法

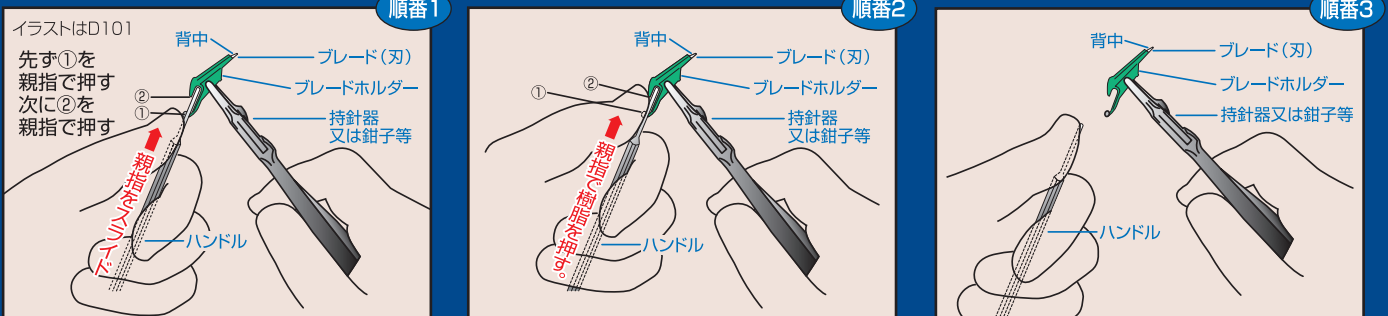

- ・医療の目的以外には使用しないでください。
- ・ブレード(刃)の使用は1回限りです。再滅菌、再使用はしないでください。ハンドルは再洗浄・再滅菌後の再使用が可能です。ご使用の度に洗浄と高圧蒸気滅菌等の適切な滅菌を行い、ご使用前に体液・生体組織等の付着物がみとめられた場合は使用しないでください。
- ・ご使用の際は必ず専用のハンドルに装着してください。

ご使用に際しては必ず添付文書をお読み下さい。

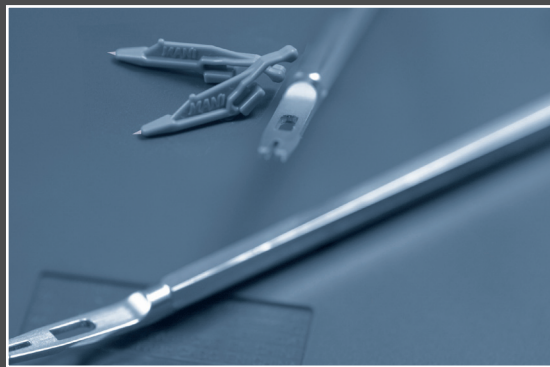

## Vessel Knife

製造  
販売元



マニー株式会社

栃木県宇都宮市清原工業団地8番3 〒321-3231



販売元

アルフレッサファーマ株式会社

大阪市中央区石町二丁目2番9号 〒540-8575

〈資料請求先〉

札幌 011-281-3000 仙台 022-295-0631 東京 03-5695-4145 名古屋 052-218-5251

大阪 06-6941-2818 広島 082-545-7835 高松 087-863-7181 福岡 092-283-6306

営業本部 メディカルデバイス営業統括部 MD推進部 TEL.06-6941-0303

URL <http://www.alfresa-pharma.co.jp>

※ご使用に際しては必ず添付文書をお読み下さい。

※製品改良のため予告なく仕様を変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

® 登録商標

2017.12.00(1)(B)-4

2017年12月改訂

4270100104