


# イーザーポスト

医療機器認証番号 21200BZZ00623000  
管理医療機器 一般的名称：歯科根管用ポスト成形品  
販売名 マニーイーザーポスト

■単品：12本入 ■イントロサイズキット：各3本入（63本） ■フルサイズキット：各12本入（252本） ■材質：ステンレススチール

| サイズ |              | 先端径 (mm) |        |
|-----|--------------|----------|--------|
| 2   | S・M          | 0.85     | 8.0mm  |
| 3   | S・M・L・EL・UEL | 1.05     | 9.5mm  |
| 4   | S・M・L・EL・UEL | 1.25     | 12.0mm |
| 5   | S・M・L・EL・UEL | 1.45     | 14.5mm |
| 6   | M・L・EL・UEL   | 1.65     | 17.0mm |

## ■ 作業部長 (L)

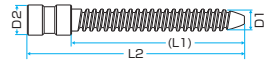

長さ

|     | L1     | L2     |
|-----|--------|--------|
| S   | 5.5mm  | 8.0mm  |
| M   | 7.0mm  | 9.5mm  |
| L   | 9.5mm  | 12.0mm |
| EL  | 12.0mm | 14.5mm |
| UEL | 14.5mm | 17.0mm |

太み

|   | φD1    | φD2    |
|---|--------|--------|
| 2 | 0.85mm | 1.30mm |
| 3 | 1.05mm | 1.50mm |
| 4 | 1.25mm | 1.70mm |
| 5 | 1.45mm | 1.90mm |
| 6 | 1.65mm | 2.10mm |

## サイズ対応表 - 21種類のラインナップ-

マニーピーソリーマ (ISO規格品) を使用する事で、各ポストサイズに対応した合釘孔形成ができます。

マニーピーソリーマ

単位: mm

| 太み         | 1(φ0.70) | 2(φ0.90) | 3(φ1.10) | 4(φ1.30) | 5(φ1.50) | 6(φ1.70) |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| マニーイーザーポスト |          |          |          |          |          |          |

マニーイーザーポスト

| 長さ  | 太み   | マニーイーザーポスト |      |      |      |      |      |
|-----|------|------------|------|------|------|------|------|
|     |      | φD1        | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
|     |      | φD1        | 0.85 | 1.05 | 1.25 | 1.45 | 1.65 |
|     |      | φD2        | 1.30 | 1.50 | 1.70 | 1.90 | 2.10 |
|     |      | L1         |      |      |      |      |      |
|     |      | L2         |      |      |      |      |      |
| S   | 5.5  | 8.0        | ○    | ○    | ○    | ○    |      |
| M   | 7.0  | 9.5        | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    |
| L   | 9.5  | 12.0       |      | ○    | ○    | ○    | ○    |
| EL  | 12.0 | 14.5       |      | ○    | ○    | ○    | ○    |
| UEL | 14.5 | 17.0       |      | ○    | ○    | ○    | ○    |

## ■ 用途


支台築造の強度保持に使用

## 装着ポイント

- ピーソリーマの規格に合わせてポストを選択。
- 各ポストの径は、ピーソリーマ径より0.05mm細く作られていますので、**ねじ込み**装着。
- **専用ドライバー等**は必要ありません。

### STEP1

- ①合釘孔形成  
マニーピーソリーマで合釘孔を形成します。

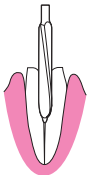

### STEP2


- ②イーザーポスト選択  
ポストサイズは①で使用したピーソリーマに対応するサイズを試適し確認します。



### STEP3

- ③イーザーポストの装着  
マニーベストキャリアを使用し根管にセメントを充填し、ポストにもセメントを盛り装着します。

イーザーポストは、スクリーユタイプ<sup>®</sup>の深い溝 (Effective Grooves) を付与していますので、セメントとの接着面積を増やし、保持力を持たせています。

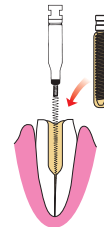

## ■ 標準価格

|        |          |             |
|--------|----------|-------------|
| 単品12本入 | 各3本 計63本 | 各12本 計252本入 |
| ¥780   | ¥3,200   | ¥12,100     |