

NiTi フレアーファイル


医療機器届出番号 09B1X00006011110
 一般医療機器 一般名称: 歯科用ファイル
 販売名 マニーFファイル NiTi

■最小包装単位: 6本入/ケース ■アソート(ASS): #15~40 ■材質: ニッケルチタン ■テーパー: 5/100

サイズ	先端径 (mm)	
15	0.15	
20	0.20	
25	0.25	
30	0.30	
35	0.35	
40	0.40	

ラバーストッパー: 21mm □ 25mm ■


■ 作業部長 (L)

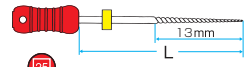

L=21mm, 25mm


■ 使用方法

リーミング (reaming) 1/4 回転切削 +
 ファイリング (filing) 牽引切削

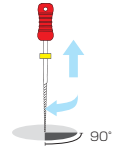

作業手順の短縮


従来は何本ものファイルを交互に使用するため作業手順が複雑でしたが、
 フレアーファイルは、**より少ない本数**で根管口から根尖孔に至るまでの
 フレアー形成が可能です。

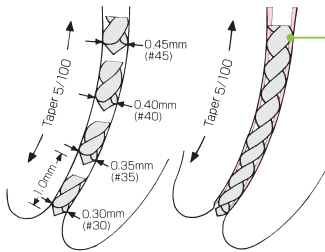

理想的なテーパー 5~7/100

テーパーが大きなファイルですが横
 断面形状を正三角形にすることで、柔
 軟性・切削効率を高めております。

■ 刃部拡大図

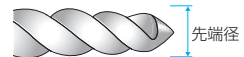

■ 横断面形状

15 ~ 40 ▲

■ 用途

根管の拡大形成などに使用

中間サイズの役割

ファイルへの負担を軽減させる為に、中間サイズを使用することでより
 スムーズな根管拡大が行えます。

■ 標準価格 (6本入)

#15 ~ 40

¥5,200