








スプレッター

医療機器届出番号 09B1X00006006010
 一般医療機器 一般的名称：歯科用根管スプレッター
 販売名 マニースプレッター

■最小包装単位：6本入/ケース ■アソート：#15~40 ■材質：ステンレススチール ■テーパー：2/100

サイズ	先端径 (mm)	
15	0.15	
20	0.20	
25	0.25	
30	0.30	
35	0.35	
40	0.40	

■ 作業部長 (L)

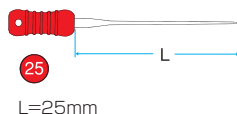


■ 刃部拡大図



■ 用途


根管充填に用いる

● ● ● 使用方法 ● ● ●

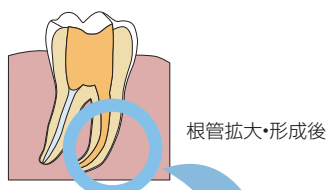

側方加圧根管充填 lateral condensation of root canal filling

根管拡大・形成、清掃の終了した根管をシーラーとマスターポイントを用いて充填し、封鎖する方法。一般にシーラーをつけたマスターポイントを根管内に挿入後、スプレッターで根尖方向、根管壁方向（側面）に圧接、その間隙にアクセサリーポイントを挿入、これを繰り返して根管内を緊密に閉鎖する。

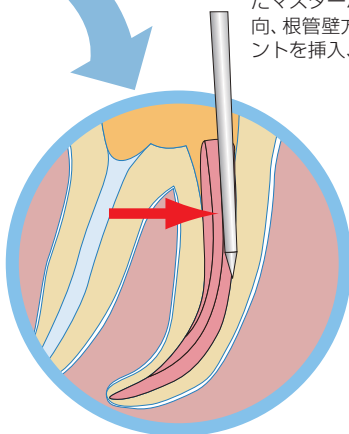

■ 標準価格 (6本入)

15~40

¥3,850