





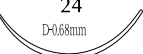









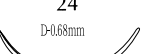


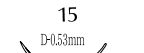
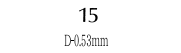



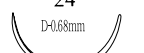
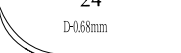
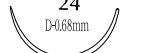
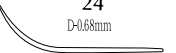
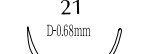
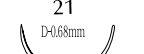
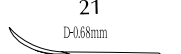

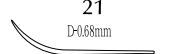


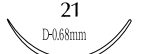
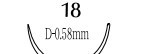




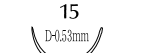



マニーアイド縫合針 / MANI SURGICAL EYED NEEDLES


マニーアイド縫合針は歯科用であり、針単体で販売いたします。

角 針 			丸 針 		
逆角針 					
角弱	逆角弱	角直	丸弱	丸直	
					
24 D=0.68mm	24 D=0.68mm	24 D=0.68mm	24 D=0.68mm	24 D=0.68mm	
					
21 D=0.68mm	21 D=0.68mm	21 D=0.68mm	21 D=0.68mm	21 D=0.68mm	
					
18 D=0.58mm	18 D=0.58mm	18 D=0.58mm	18 D=0.58mm	18 D=0.58mm	
					
15 D=0.53mm	15 D=0.53mm	15 D=0.53mm	15 D=0.53mm	15 D=0.53mm	
角強	逆角強	角先曲	丸強	丸先曲	
					
24 D=0.68mm	24 D=0.68mm	24 D=0.68mm	24 D=0.68mm	24 D=0.68mm	
					
21 D=0.68mm	21 D=0.68mm	21 D=0.68mm	21 D=0.68mm	21 D=0.68mm	
					
18 D=0.58mm	18 D=0.58mm	18 D=0.58mm	18 D=0.58mm	18 D=0.58mm	
					
15 D=0.53mm	15 D=0.53mm	15 D=0.53mm	15 D=0.53mm	15 D=0.53mm	

標準価格(10本入)全形態 2,400円
2025年8月時点の税抜価格

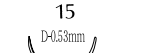バネ孔(弾機孔)

糸を傷めにくい入口

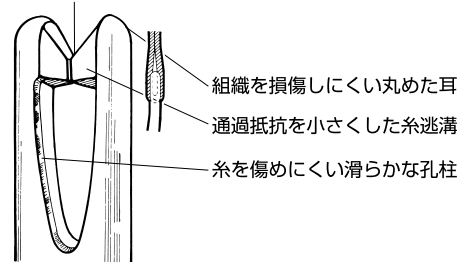

MANIのバネ孔(弾機孔)は、縫合組織を傷めにくい丸めた耳、通過抵抗を少なくする糸逃溝を有していると共に、糸を損傷しない糸入口となめらかな孔柱にしていますので、ナミ孔(普通孔)の必要性を感じさせません。

●耐蝕性に優れ、適度な靱性と硬度を併せ持った「マニーハードファイバーステンレススチール」を採用。




注意

縫合針のご使用に際して ●本製品は医療機器です。縫合以外の目的には使用しないでください。●感染防止の為、使用前に必ず滅菌処理を行って下さい。●本製品の再使用は行わないで下さい。●針折れ、糸切れの原因になりますので、バネ孔部近くは把持しないでください。●持針器は使用前に適したサイズ、機能のものをこ使用下さい。●予め患者の口腔内で変形、キズ等が無いを確認して下さい。変形した針、キズの付いた針は折れの原因となりますので、使用しないで下さい。●針刺し事故に充分注意してご使用下さい。●ご使用後は医療廃棄物として適切な処理をして下さい。

製品ご使用前に電子添文を必ずお読みください。

角 針

丸 針

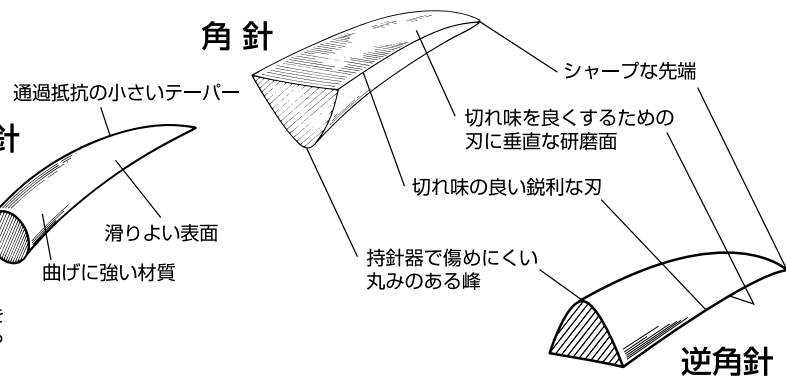

逆角針

Healthy teeth, happy smiles,
to the world.

製造販売 マニー株式会社

〒321-3231 栃木県宇都宮市清原工業団地8-3
【デンタル国内営業】Tel:028-667-8591 / Fax:028-667-8593
URL: <http://www.mani.co.jp>

発売 株式会社モリタ

大阪本社 〒564-8650 大阪吹田市垂水町3丁目33番18号 Tel:06-6380-2525
東京本社 〒110-8513 東京都台東区上野2丁目11番15号 Tel:03-3834-6161


滅菌済針付縫合糸 / MANI SUTURES

滅菌済針付縫合糸はアイレス針を用いています。本品は歯科用であり、縫合糸付で販売いたします。

注文番号	縫合針				縫合糸		
	種 類	針形状	彎 曲	針 長 針部径	USPサイズ	最小／最大 (直径mm)	材 質 全 長
1	逆三角		強湾	RH-18mm D-0.43mm	4-0	0.15/0.199	シルク ブラックブレイド 45cm
2	逆三角		強湾	RH-25mm D-0.73mm	3-0	0.20/0.249	シルク ブラックブレイド 45cm
3	逆三角		弱湾	RE-18mm D-0.58mm	4-0	0.15/0.199	シルク ブラックブレイド 45cm
4	先端角		強湾	YH-18mm D-0.38mm	5-0	0.10/0.149	ポリエステル グリーンブレイド 45cm
5	先端角		強湾	YH-18mm D-0.53mm	3-0	0.20/0.249	シルク ブラックブレイド 45cm
6	丸 (テーパー小)		直	TS-20mm D-0.58mm	4-0	0.15/0.199	シルク ブラックブレイド 45cm
7	逆三角		弱湾	RE-13mm D-0.53mm	4-0	0.15/0.199	ナイロン ブラックブレイド 45cm
8	逆三角		弱湾	RE-18mm D-0.58mm	4-0	0.15/0.199	ポリエステル グリーンブレイド 45cm
9	丸 (テーパー小)		強湾	TH-18mm D-0.43mm	5-0	0.10/0.149	ポリエステル グリーンブレイド 45cm
10	丸 (テーパー小)		強湾	TH-18mm D-0.53mm	3-0	0.20/0.249	シルク ブラックブレイド 45cm
11	丸 (テーパー小)		強湾	TH-16mm D-0.73mm	2-0	0.30/0.339	シルク ブラックブレイド 45cm
12	丸 (テーパー大)		釣針	AJ-16mm D-0.53mm	4-0	0.15/0.199	ナイロン ブラックブレイド 45cm
13	丸 (テーパー大)		釣針	AJ-16mm D-0.63mm	3-0	0.20/0.249	ナイロン ブラックブレイド 45cm
14	丸 (テーパー大)		強湾	AH-13mm D-0.53mm	4-0	0.15/0.199	シルク ブラックブレイド 45cm
15	丸 (テーパー大)		強湾	AH-16mm D-0.53mm	4-0	0.15/0.199	ナイロン ブラックブレイド 45cm
16	丸 (テーパー大)		強湾	AH-16mm D-0.63mm	3-0	0.20/0.249	ナイロン ブラックブレイド 45cm
17	丸 (テーパー大)		強湾	AH-20mm D-0.58mm	4-0	0.15/0.199	シルク ブラックブレイド 45cm
18	逆三角		弱湾	RE-11mm D-0.43mm	4-0	0.15/0.199	ナイロン ブラックモノフィラメント 45cm
19	逆三角		弱湾	RE-13mm D-0.38mm	5-0	0.10/0.149	ナイロン ブラックモノフィラメント 45cm
20	逆三角		弱湾	D-0.58mm	4-0	0.15/0.199	シルク ブラックブレイド 45cm

医療機器承認番号 20900BZZ00869000
高度管理医療機器 一般的名称：滅菌済み絹製縫合糸
販売名 マニーシルク
医療機器承認番号 21100BZZ00049000
高度管理医療機器 一般的名称：ポリアミド縫合糸
販売名 マニーナイロン
医療機器承認番号 21100BZZ00050000
高度管理医療機器 一般的名称：ポリエステル縫合糸
販売名 マニーポリエステル


注文番号	縫合針				縫合糸		
	種 類	針形状	彎 曲	針 長 針部径	USPサイズ	最小／最大 (直径mm)	材 質 全 長
21	逆三角		強湾	RH-16mm D-0.58mm	4-0	0.15/0.199	ナイロン ブラックモノフィラメント 45cm
22	逆三角		強湾	RH-16mm D-0.58mm	4-0	0.15/0.199	シルク ブラックブレイド 45cm
23	逆三角		弱湾	RE-18mm D-0.58mm	4-0	0.15/0.199	ナイロン ブラックモノフィラメント 45cm
24	逆三角		弱湾	RE-18mm D-0.58mm	3-0	0.20/0.249	シルク ブラックブレイド 45cm
25	丸 (テーパー小)		弱湾	TE-13mm D-0.43mm	4-0	0.15/0.199	シルク ブラックブレイド 45cm
26	丸 (テーパー小)		弱湾	TE-18mm D-0.58mm	4-0	0.15/0.199	シルク ブラックブレイド 45cm
27	先端角		弱湾	YE-13mm D-0.43mm	4-0	0.15/0.199	シルク ブラックブレイド 45cm
28	先端角		強湾	YH-16mm D-0.48mm	4-0	0.15/0.199	シルク ブラックブレイド 45cm
29	先端角		弱湾	YE-18mm D-0.53mm	4-0	0.15/0.199	シルク ブラックブレイド 45cm

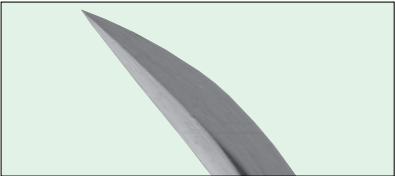

●逆三角針

注文番号(N0.): 1,2,3,7,8,18,19,20,21,22,23,24


弯曲の内側が三角形の底辺となる逆三角形断面であり、刃が弯曲の内外に付いています。主に硬く刺通しにくい組織に適しています。

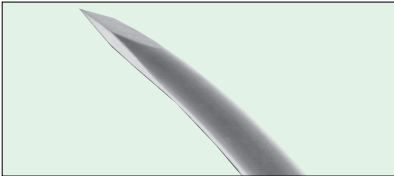

●先端角針

注文番号(N0.): 4,5,27,28,29

丸針の先端を三角形の鋭線にして刃を付けたため、組織の侵襲が少ないです。硬組織の縫合に適しています。



●丸 針 (テーパー小)

注文番号(N0.): 6,9,10,11,25,26

先端が細く鋭いので、主に柔らかい組織の縫合に適しています。



●丸 針 (テーパー大)

注文番号(N0.): 12,13,14,15,16,17

先端が太く曲がり強いので、主に硬組織の縫合に適しています。

●耐蝕性に優れ、適度な靱性と硬度を併せ持った「マニーハードファイバーステンレススチール」を採用。

標準価格(12本入/箱) 全形態 5,800円


2025年8月時点の税抜価格

各縫合糸の特徴

- シルク・ブレイド
他の縫合糸よりも操作性・伸張性に優れています。
- ポリエステル・ブレイド
結節・抗張力・不活性・組織通過性・感染抵抗性に優れています。
- ナイロン・ブレイド
結節・抗張力・不活性・感染抵抗性に優れています。
- ナイロン・モノフィラメント
抗張力・不活性・組織通過性・感染抵抗性に優れています。

縫合糸の性状比較

縫 合 糸	結節抗張力	組織反応性	劣 化 性	感染抵抗性	操 作 性
シルクブレイド	○	△	△	×	○
ポリエステルブレイド	○	◎	◎	△	◎
ナイロンブレイド	◎	◎	△	△	△
ナイロンモノ	◎	◎	△	△	△

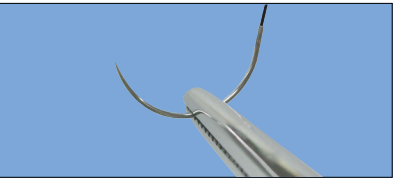

糸と針の接合部や針先を持針器で把持すると、針折れ、糸切れ等の原因となるので接合部から針先までの1/3から1/2の部分を把持して下さい。

⚠注意

滅菌済針付縫合糸のご使用に際して ●本製品は医療機器です。縫合以外の目的には使用しないでください。 ●本製品は滅菌品です。再滅菌はしないで下さい。 ●本製品の再使用は行わないで下さい。 ●針折れ、糸切れの原因になりますので、接合部近くは把持しないでください。 ●持針器は使用前に適したサイズ、機能のものを選択しご使用下さい。 ●予め患者の口腔外で変形、キズ等が無いか確認して下さい。変形した針、キズの付いた針は折れの原因となりますので、使用しないで下さい。 ●針刺し事故に充分注意してご使用下さい。 ●ご使用後は医療廃棄物として適切な処理をして下さい。

製品ご使用前に電子添文を必ずお読みください。