




MANI®

FOR ADVANCED TREATMENT

M CARBIDE BURS⁺

ネック強度UPを実現!(当社比) ステンレスシャंकで錆に強い!

 2.00 19.00	 4.00 19.00	 4.00 19.00
M330	M1557	M1558
232/008	137/010	137/012

許容回転数

#330・#1557=30万回転 (300,000r.p.m)

#1558 =20万回転 (200,000r.p.m)

標準価格 (10本入り)

1,800円

⚠ 注意 FGカーバイドバーご使用に際して

●本製品を歯科治療以外の目的には使用しないで下さい。●感染防止の為、使用前に必ず高圧蒸気滅菌処理を行って下さい。●ハンドピースメーカーの指示に従って、シャंकを確実に奥まで挿入し、半チャックでないこと、また、予め患者の口腔外で回転させて振れがないことを確認し、無負荷で回転させ、定常回転となつてからご使用ください。●破折防止のために、力を加え過ぎない様に注意し、フェザータッチで断続的に使用してください。特に頭部の長い・大きい形状のものは、折れたり曲がりたりする可能性がありますので、充分にご注意下さい。●ご使用の際には目の損傷を防ぐ為、保護眼鏡等をご使用下さい。●カーバイドバーの性能維持・目詰まり防止・歯髄炎防止の為、必ず十分な注水下でご使用下さい。●廃棄の際には医療用廃棄物として適切な処理をして下さい。●破折の原因となりますので、許容回転数を厳守して下さい。

デザイン・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。D04420

製造販売 **MANI**
MANI, INC. マニー株式会社

発売 **株式会社モリタ**

〒321-3231 栃木県宇都宮市清原工業団地8-3 TEL:028-667-1811(代)

【歯科営業】TEL:028-667-8591 / FAX:028-667-8593

URL:<http://www.mani.co.jp>

大阪本社 ■ 〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3丁目33番18号 TEL:06-6380-2525

東京本社 ■ 〒110-8513 東京都台東区上野2丁目11番15号 TEL:03-3834-6161