

セレクト関連商品

医療機器届出番号 09B1X00006002010
一般医療機器 一般的名称：歯科用ダイヤモンドバー
販売名 マニーダイヤモンドバー

医療機器届出番号 09B1X00006003010
一般医療機器 一般的名称：歯科用カーバイドバー
販売名 マニーカーバイドバー

■形態表の見方

CE-12F 品番

■ダイヤモンド粒子の識別
【赤】ファイン(F)/90-75μ
【黄】エクストラファイン(EF)/20-30μ

9.0/21.7 作業部長/全長(mm)
300,000 最高許容回転数(r.p.m.)

■標準価格

ダイヤモンドF.G. プリスターパック セレクト用 CE-12F	(249662CE12F)	3,000円/5本入
ダイヤモンドF.G. プリスターパック セレクト用 CE-12EF	(249662CE12EF)	3,000円/5本入
ダイヤモンドF.G. プリスターパック セレクト用 CE-13F	(249662CE13F)	3,000円/5本入
ダイヤモンドF.G. プリスターパック セレクト用 CE-13EF	(249662CE13EF)	3,000円/5本入
ダイヤモンドF.G. プリスターパック セレクト用 CE-15F	(249662CE15F)	3,000円/5本入
ダイヤモンドF.G. プリスターパック セレクト用 CE-15EF	(249662CE15EF)	3,000円/5本入
ダイヤモンドF.G. プリスターパック セレクト用 CE-16F	(249662CE16F)	3,000円/5本入
ダイヤモンドF.G. プリスターパック セレクト用 CE-16EF	(249662CE16EF)	3,000円/5本入
ダイヤモンドF.G. プリスターパック セレクト用 CE-17F	(249662CE17F)	3,000円/5本入
カーバイドバーF.G. プリスターパック IIIクラス M14CF	(249402M14CF)	4,200円/5本入
カーバイドバーF.G. プリスターパック IIIクラス CE4CF	(249402CE4CF)	4,200円/5本入

ステリバーガード12


1,500円/個

- バーを挿入したままオートクレーブ滅菌が可能です。
- CA、FG両用タイプにご使用になれます。
- カラー：白・黄・青/12本立て

各商品の特徴

CE-12F

クラウンやジャケットの軸壁を形成してスロードラウンテッドショルダーのマージン形成時に使用

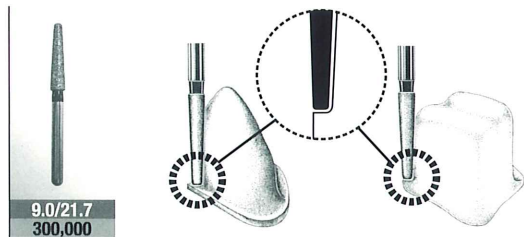

CE-12EF

CE-12Fでラフに形成したあとを仕上げる際に使用
(5倍速コントラ使用推奨)




CE-13F

インレー、オンレーのイスマスや側壁の形成に使用




CE-13EF

インレー形成の仕上げに使用
(5倍速コントラ使用推奨)

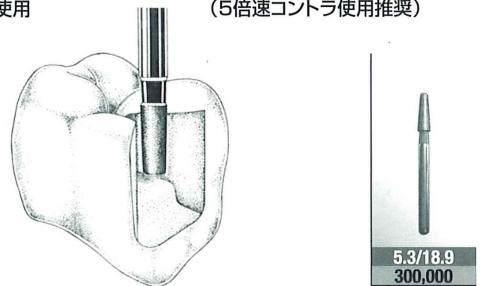

CE-15F

前歯ジャケットの舌側面の形成に使用

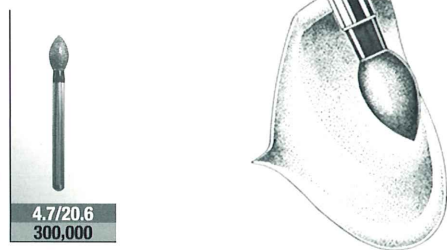

CE-15EF

前歯ジャケットの舌側面の仕上げに使用




CE-16F

ベニヤ形成やII級インレー側の開放角の付与に使用




CE-16EF

CE-16Fでラフに形成したあとを仕上げる際に使用
(5倍速コントラ使用推奨)

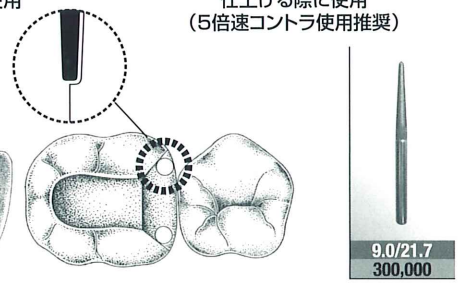


CE-17F

インレー形成時軸側エッジを整える際に使用

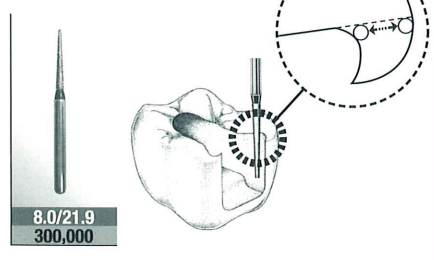

M14CF


歯頸部、隣接面レジンセメントの除去に使用

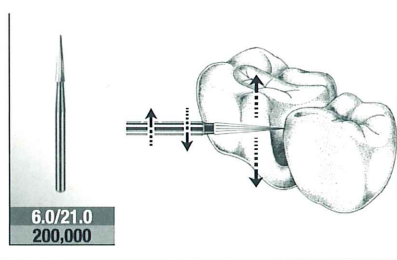

CE4CF

ご使用に際して

●本製品を歯科治療以外の目的には使用しないで下さい。
●感染防止の為、使用前には必ず高圧蒸気滅菌処理を行って下さい。
●ハンドピースメーカーの指示に従って、シャンクを確実に奥まで挿入し、半チャックでないこと、また予め患者の口腔外で回転させて振れがないことを確認し、無負荷で回転させ、定常回転となつてからご使用下さい。
●破折防止のために、力を加え過ぎない様に注意し、フェザータッチで断続的に使用して下さい。とくに頭部の細い・長い大きい形状のものは、折れたり曲がつたりする可能性がありますので、充分にご注意下さい。
●ご使用の際には、目の損傷を防ぐ為、保護眼鏡等をご使用下さい。
●ダイヤモンドの性能維持・目詰まり防止・歯髄炎防止の為、必ず充分な注水下でご使用下さい。
●廃棄の際は、医療廃棄物として適切な処理をして下さい。
●破折の原因となりますので、指定回転数を厳守して下さい。最高許容回転数は表示の通りです。

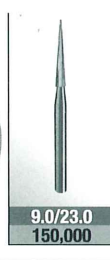

製造販売 **MANI**

発売 株式会社モリタ

本社 ■ 〒321-3231 栃木県宇都宮市清原工業団地8-3 Tel:028-667-1811(代)
【歯科営業】Tel:028-667-8591/Fax:028-667-8593
URL:http://www.mani.co.jp

大阪本社 ■ 〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3丁目33番18号 Tel:06-6380-2525
東京本社 ■ 〒110-8513 東京都台東区上野2丁目11番15号 Tel:03-3834-6161