



Vessel Knife

製造販売元 *alfresa* アルフレッサ ファーマ株式会社

血管ナイフ：
医療機器承認番号
22000BZX01617000

血管ナイフ ハンドル：
医療機器届出番号
09B1X00006020010

心臓血管外科医が考案した製品です

特長

血管ナイフ

ブレードの切れ味が優れています。








無理のない操作で冠状動脈を容易に切開することができます。

ブレードは0度と角度付(35度)、ハンドルは0度と角度付(10度)があり、これらの組み合わせにより様々な角度で使用することができます。

剥離ブレード

冠状動脈バイパス手術時のグラフト吻合部周辺組織を切開・剥離できるブレードです。

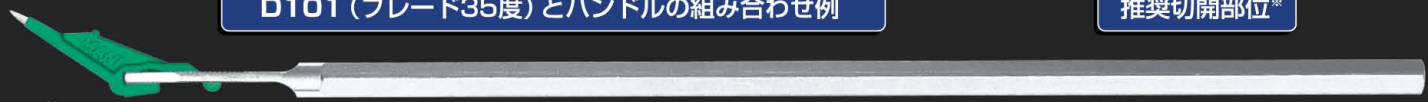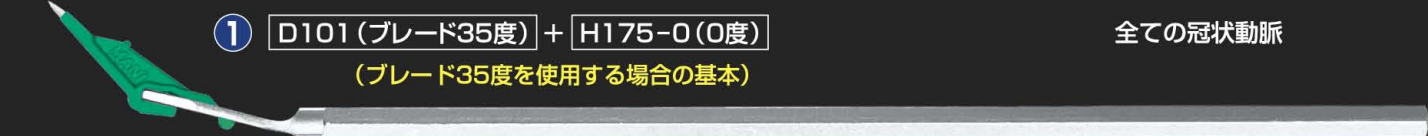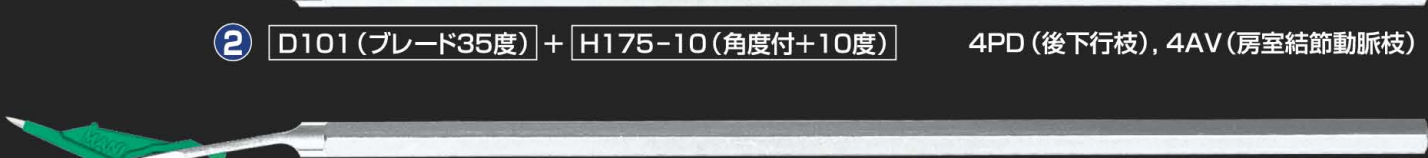
「ブレードとハンドルの組み合わせ例」および「推奨切開部位」

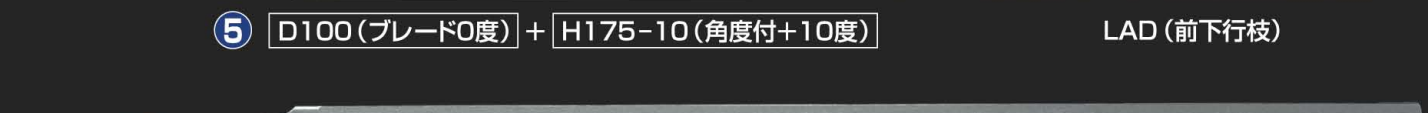D101 (ブレード35度) とハンドルの組み合わせ例		推奨切開部位*
	① D101 (ブレード35度) + H175-0 (0度) (ブレード35度を使用する場合の基本)	全ての冠状動脈
	② D101 (ブレード35度) + H175-10 (角度付+10度)	4PD (後下行枝), 4AV (房室結節動脈枝)
	③ D101 (ブレード35度) + H175-10 (角度付-10度)	LAD (前下行枝), LCX (左回旋枝)
D100 (ブレード0度) とハンドルの組み合わせ例		推奨切開部位*
	④ D100 (ブレード0度) + H175-0 (0度) (ブレード0度を使用する場合の基本)	全ての冠状動脈
	⑤ D100 (ブレード0度) + H175-10 (角度付+10度)	LAD (前下行枝)
	⑥ D100 (ブレード0度) + H175-10 (角度付-10度)	LCX (左回旋枝)
D500 (剥離ブレード) とハンドルの組み合わせ例		
	⑦ D500 (ブレード0度) + H175-0 (0度)	

※推奨切開部位は参考であり、術者が最適と判断する「ブレードとハンドルの組み合わせ」でご使用ください。



血管ナイフ

形状	製品規格	滅菌方法	使用期限	入数	JANコード 4987274
	D100※ ブレード(0度)	E.O.G.	製造日より 3年	5入/箱	37039-7
	D101※ ブレード(35度)	E.O.G.	製造日より 3年	5入/箱	37253-7
	剥離ブレード D500※ ブレード(0度)	E.O.G.	製造日より 3年	5入/箱	04244-7
	H175-0 ハンドル(0度)	未滅菌	—	1入/箱	37427-2
	H175-10 ハンドル(角度付)	未滅菌	—	1入/箱	37577-4



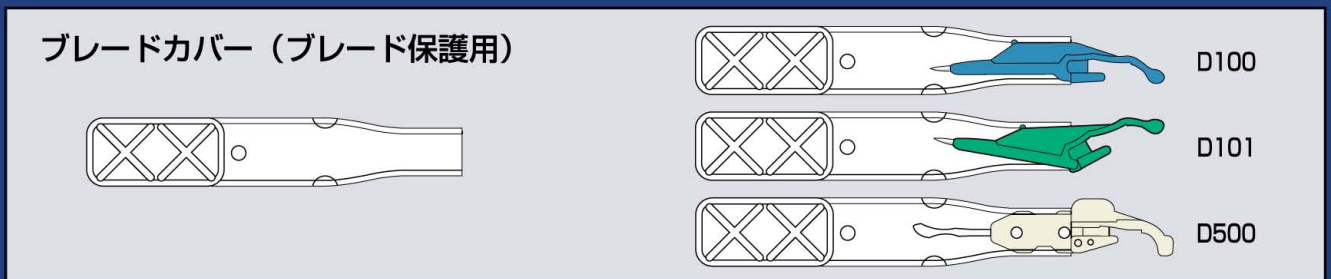


取り付け及び取り外し方法

取り付け方法

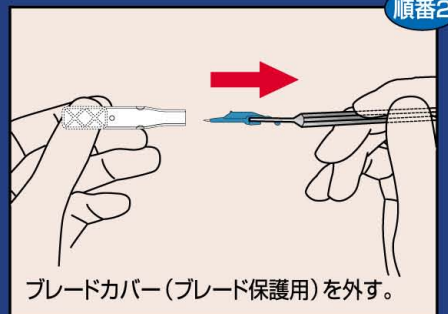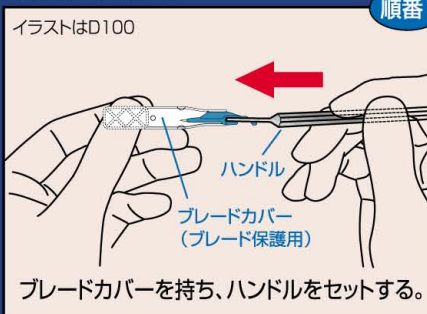

ブレード (刃) の取り外し方法

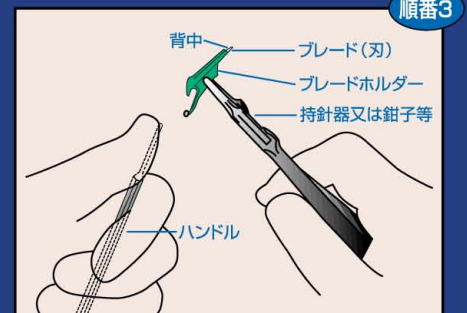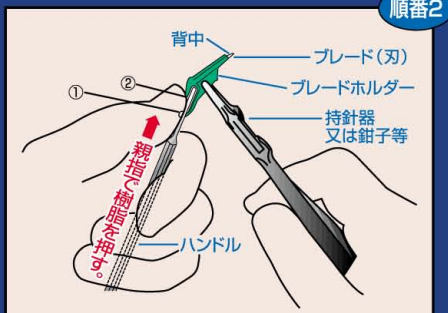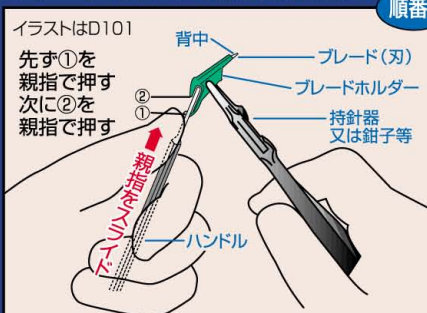

- ・ 医療の目的以外には使用しないでください。
- ・ ブレード(刃)の使用は1回限りです。再滅菌、再使用はしないでください。ハンドルは再洗浄・再滅菌後の再使用が可能です。ご使用の度に洗浄と高圧蒸気滅菌等の適切な滅菌を行い、ご使用前に体液・生体組織等の付着物がみとめられた場合は使用しないでください。
- ・ ご使用の際は必ず専用のハンドルに装着してください。

ご使用に際しては必ず添付文書をお読み下さい。

