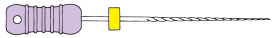
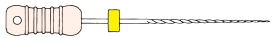
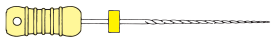

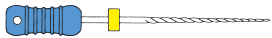
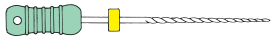


# 中間リーマ


医療機器届出番号 09B1X00006010010  
 一般医療機器 一般的名称：歯科用根管リーマ  
 販売名 マニーリーマ

■最小包装単位：6本入/ケース ■アソート(ASS)：#12～37 ■材質：ステンレススチール ■テーパー：2/100

サイズ	先端径 (mm)	
12	0.12	
17	0.17	
22	0.22	
27	0.27	
32	0.32	
37	0.37	


ラバーストッパー：21mm ▷ 25mm ▶

## ■ 作業部長 (L)

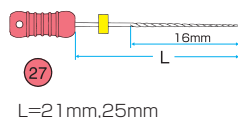

## ■ 使用方法

リーミング (reaming)  
 1/4 ~ 1/2 回転切削

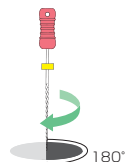

## ■ 刃部拡大図



## ■ 横断面形状

# 12 ~ 37 ■

## ■ 用途

根管の拡大形成や創傷清拭  
 などに使用

## リーミング(reaming)

回転操作 (1/4 ~ 1/3 回転)によって、根管壁を切削し、拡大する操作。

## 中間サイズの役割

リーマは、ISO 規格に基づいて造られております。ISO 規格のファイルは、太みの変化率が大きいところで50%になります。ファイルへの負荷を軽減させる為に、ISO 規格ファイルの間に中間サイズを使用する事で、よりスムーズな根管拡大が行えます。

## ● ● ● 関連商品 ● ● ●

リーマより穿通力を求めるには…

**D ファインダー** 【参考】…P21

エンジンタイプは…

**エンジンリーマ** 【参考】…P24

## ■ 標準価格 (6本入)

#10~40	#06,#08,#45~80	#90~140	中間リーマファイル #12~37
¥1,750	¥2,200	¥2,750	¥2,750