



マイクロファイル・エンドホルダー
MICRO FILES・ENDO HOLDER

FOR ADVANCED TREATMENT — 高度な治療のために —



NEW MICRO FILES

マイクロファイル



ENDO HOLDER

エンドホルダー



**実体顕微鏡・拡大鏡下での視野確保に！
臼歯部など機器の操作が困難であった部位に！**

■ エンドホルダー



チューブ色は、ファイルの規格表示となります。
ラバーストッパーとしては
ご使用になれません。

滑りにくいシリコングリップ

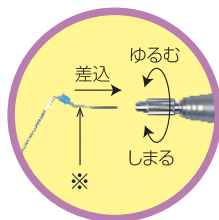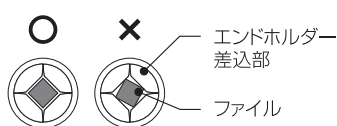

マイクロファイルを装着する際は、※の部分までしっかりと差込み、
エンドホルダーの先端を回転させしっかりと固定して下さい。
(ファイルに緩みがないことを再度ご確認ください。)

オートクレープ可能(乾燥不可)

オートクレープの際は、ファイルを取り外して行って下さい。


標準価格(1本入) **8,300円**

■ マイクロファイル

■ TypeK, TypeHに#08、#10を追加しました。

Type K

医療機器届出番号 09B1X00006011070
一般医療機器 一般的名称: 歯科用ファイル
販売名 マニーマイクロファイルtypeK

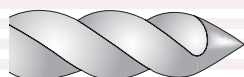


通常のKファイルの代わりに。

- 材質: ステンレススチール
- テーパー: 2/100
- 規格: #08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ASS

Type H

医療機器届出番号 09B1X00006011080
一般医療機器 一般的名称: 歯科用ファイル
販売名 マニーマイクロファイルtypeH

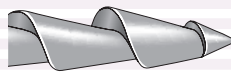


根管拡大及び、切削屑除去などに。

- 材質: ステンレススチール
- テーパー: 2/100, 4/100
- 規格: 4/100(#8, 10)
2/100(#15, 20, 25, 30, 35, 40, ASS)

Type F

医療機器届出番号 09B1X00006011090
一般医療機器 一般的名称: 歯科用ファイル
販売名 マニーマイクロファイルtypeF

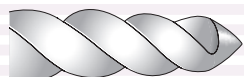

テーパー0.05を利用して、
フレアー形成及び根管拡大の確認などに。

- 材質: ステンレススチール
- テーパー: 5/100
- 規格: #15, 20, 25, 30



TypeK, TypeH(#08, #10)
標準価格(6本入/ケース)

3,600円

TypeK, TypeH(#15~#40)
標準価格(6本入/ケース)

2,500円

TypeF
標準価格(6本入/ケース)

3,100円

製造販売

MANI
MANI, INC. | マニー株式会社

〒321-3231 栃木県宇都宮市清原工業団地8-3
【デンタル営業】Tel:028-667-8591 / Fax:028-667-8593
Exp.Sec. / Phone:028-667-8592 URL: <http://www.mani.co.jp>

発売 株式会社モリタ

大阪本社 ■ 564-8650 大阪府吹田市垂水町3丁目33番18号 Tel:06-6380-2525
東京本社 ■ 110-8513 東京都台東区上野2丁目11番15号 Tel:03-3834-6161

D03611