


鼻中隔縫合用持針器

Maniceps®

Septum Stitch

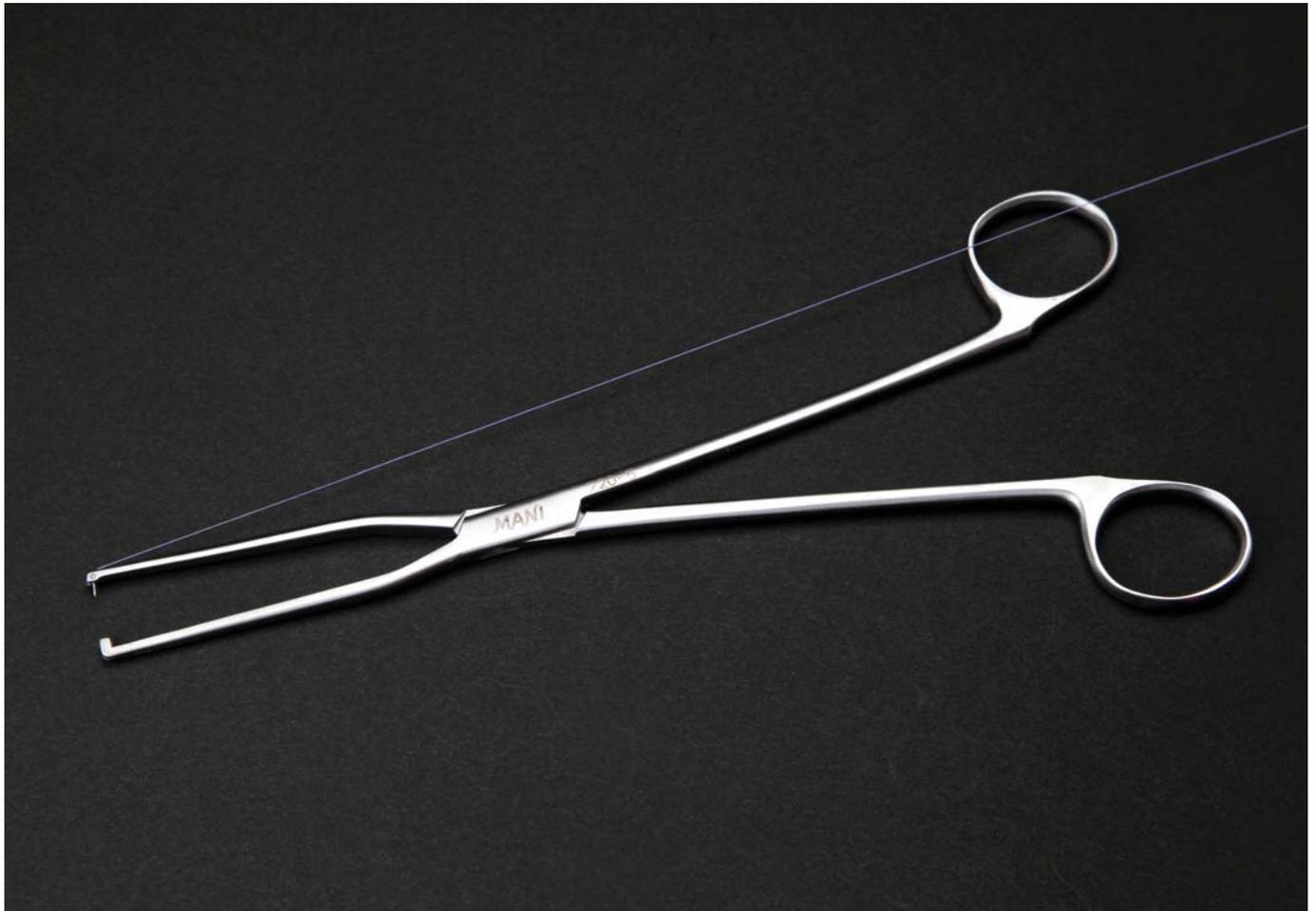


MANI®

THE BEST QUALITY IN THE WORLD, TO THE WORLD.

Maniceps® Septum Stitch

セプタムスティッチは先端を閉じるだけで組織に縫合糸が刺通できます。
狭いスペースでも迅速に正確な縫合が可能です。

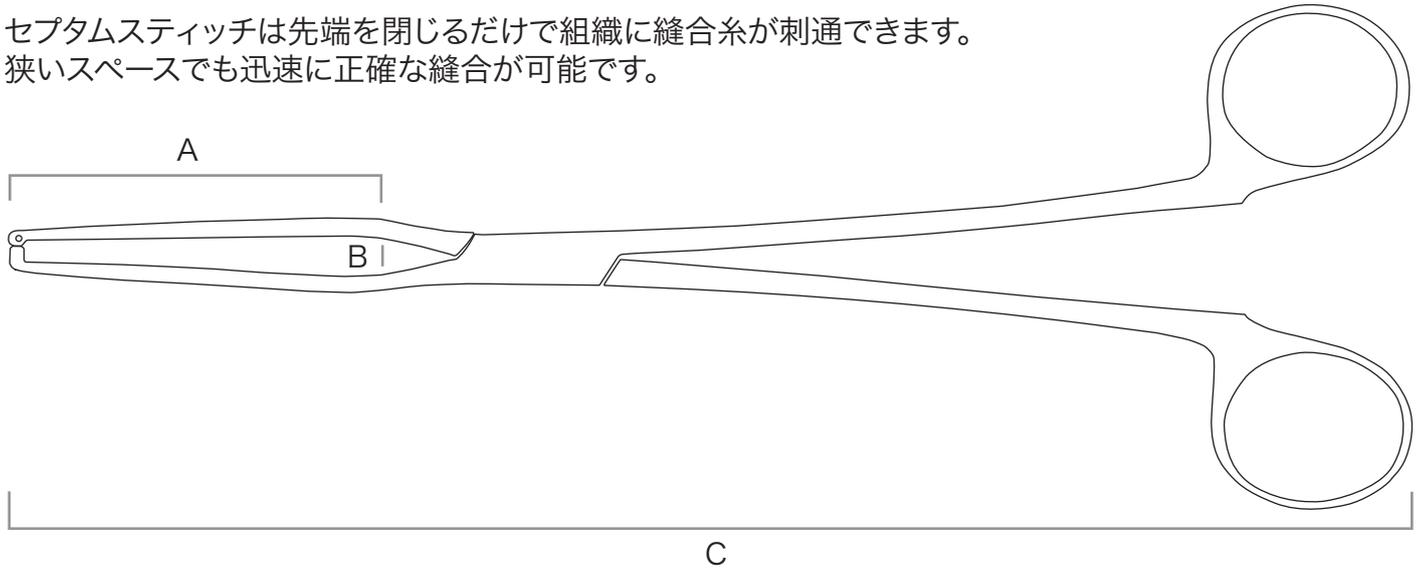




製品番号	製品名	A	B	C
220-5	セプタムスティッチ	55mm	6mm	220mm

販売名 マニセプス
医療機器届出番号 09B1X00006016010


※専用滅菌済針付縫合糸は別売りです。

セプタムスティッチ使用方法


- ① 針を送針部にセットし、セプタムスティッチの先端で鼻中隔を挟むように鼻腔に挿入します。
- ② セプタムスティッチの先端を閉じます。強く挟み過ぎると鼻中隔を損傷しますのでご注意ください。
- ③ 針が受針部へ移動したのを確認しながら、セプタムスティッチを開き、器具を術者側に引き寄せます。

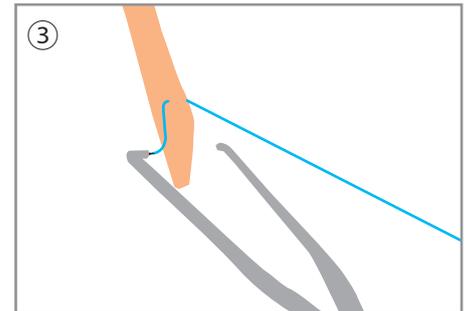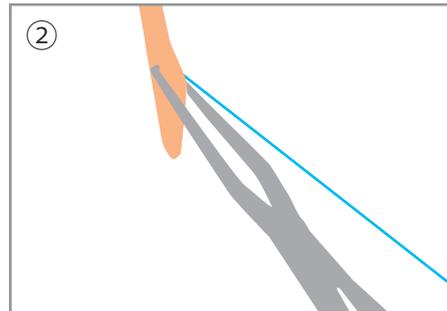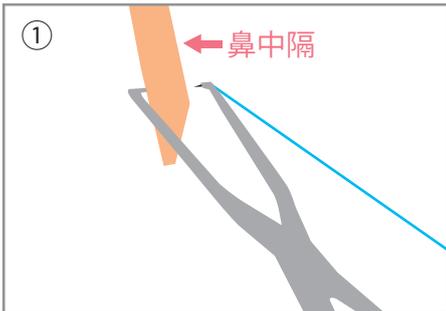

- ④ 受針部に移動した針を再び最初の位置(送針部)に付け直します。

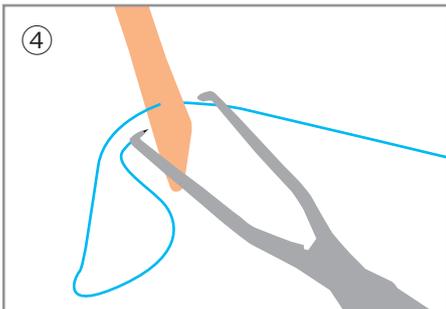

- ⑤ ①～③と同じ要領で、針を逆方向に鼻中隔に通します。

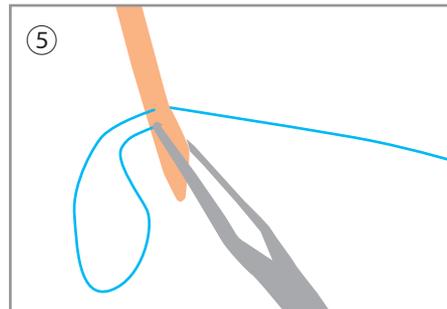

- ⑥ 鼻中隔への糸の刺通が完了します。

