

MANI


マニーダイヤモンド
スーパーコース

MANI DIA-BURS SUPER COARSE

Healthy teeth, happy smiles,
to the world.



当社ダイヤモンドでの比較

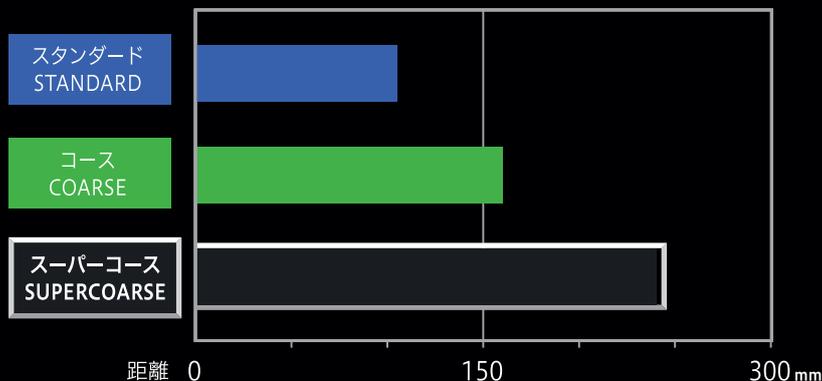

・切削量を比較したグラフ（許容回転数等同じ条件下）

※切削対象物：エナメル質と同等の物質



スタンダードを使用するよりも、治療効率がよくなります。

〈参考写真〉

栃木県宇都宮市開業

やまうち歯科 secondstage:山内聡先生

- ▶治療時間の**短縮**に!
- ▶**カーバイドバー**の代わりとしても有効!
- ▶**ジルコニア**の除去に効果的!



ダイヤモンド スーパーコース形態表

形態表の見方

| ISO 198/020 | ISO 039/034 | ISO 237/023 | ISO 237/034 | ISO 257/034 | ISO 141/014 | ISO 166/018 | ISO 173/018 | ISO 170/023 | ISO 170/018 | ISO 198/020 | ISO 197/018 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 9.3/21.9 | 5.1/19.2 | 5.3/19.1 | 5.1/19.1 | 5.2/19.2 | 8.3/22.3 | 10.3/22.1 | 10.3/21.9 | 5.6/19.1 | 4.3/19.1 | 9.3/21.9 | 7.3/21.2 |
| TR-13SC | EX-11SC | EX-21SC | EX-26SC | FO-27SC | SR-11SC | TC-11SC | TF-12SC | TF-22SC | TF-31SC | TR-13SC | TR-21SC |

許容回転数 ▶ 16万回転 160,000min⁻¹ 30万回転 300,000min⁻¹ 45万回転 450,000min⁻¹ 標準価格 1シート5本入 **5,000円**

※2025年7月時点の税抜価格

注意
ダイヤモンドのご使用に際して

【使用上の注意】●許容回転数を超えた場合には破折して怪我をする恐れがあるので許容回転数を厳守し、フェザータッチで使用すること。●本品は歯科用ハンドピースを製造しているメーカーの指示に従ってシャックを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。●頭部が細いもの、長いものあるいは大きいものは、折れや曲がりが生じるほどの角度や加圧下での使用は避けること。●本品を使用する際には、目の損傷を防ぐ為に保護眼鏡などを使用すること。また作業時に発生する粉塵を吸い込まないよう作業時には防塵マスクを着用すること。●ラバーダム等を装着して、落下・誤飲に注意すること。●使用前に口腔外で予備回転を行い、振れがないことを確認すること。●注水下で研削物及び作業部を冷却して使用すること。●使用後は直ちに医療用洗剤とブラシ等を使用して洗浄し、付着した体液・生体組織等の異物を完全に洗い落とすこと。●超音波洗浄器での洗浄は、作業部の劣化を避ける為、スタンド類にセットしてから洗浄すること。●本品はEDTA溶液、次亜塩素酸ナトリウム等の腐食性溶液に長時間浸漬した場合、腐食等の恐れがあるので注意すること。

⚠ 製品ご使用前に電子添文を必ずお読みください。

製造販売 **マニー株式会社**

〒321-3231 栃木県宇都宮市清原工業団地8-3
【デンタル国内営業】Tel:028-667-8591 / Fax:028-667-8593
URL: <http://www.mani.co.jp>

発売 **株式会社モリタ**

大阪本社 〒564-8650 大阪吹田市垂水町3丁目33番18号 Tel:06-6380-2525
東京本社 〒110-8513 東京都台東区上野2丁目11番15号 Tel:03-3834-6161