

MANI



より安全、より快適な、 操作性の追求

jizai
—自在—


NiTiロータリーファイル

根管治療の悩みを解決するために

日々の治療において、より安全・より快適に使用できるファイルを追求め、私たちは「操作性」、「追従性」、「耐久性」をキーワードに「JIZAI」を開発いたしました。湾曲根管へのアプローチに信頼できるサポートを提供することが、皆さまの負担軽減と安心につながるように。

デザイン

「引き込まれを大幅に軽減」した操作性

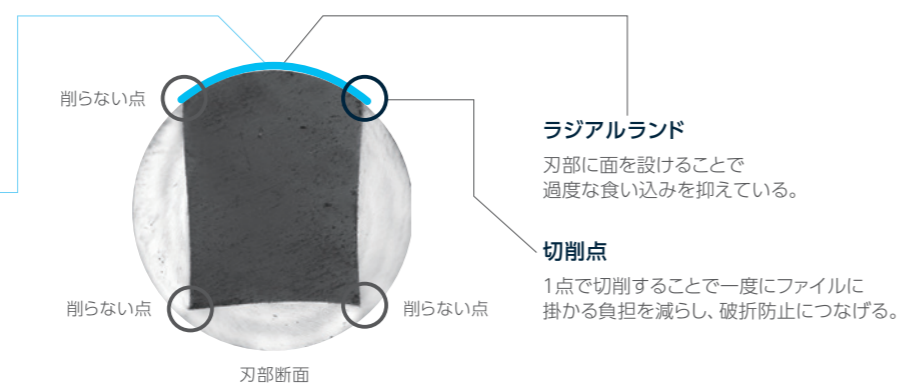


「破折への不安解消」を目指した耐久性



熱処理によって適切な柔軟性を付与しているため、疲労破折を起こしにくい。金属の模擬根管模型の中で、何回転すると折れるかという試験を行っている。(条件:500min⁻¹)

「複雑根管の治療をサポート」する追従性

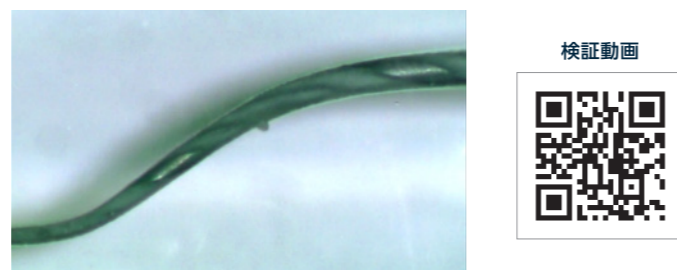

複雑な形状でも外弯・内弯に偏らない形成をサポート。

ラインアップ

ストレートラインアクセス

根管口の拡大を適切に行うことで、使用するファイルへの負担を軽減



使用する製品	長さ
JIZAIオリフィスオープナー (025 14)	18mm
正回転 許容回転数:500min ⁻¹ 以下 トルク設定値:3.0N・cm以下	

穿通

穿通にはコシのあるDファイnderを使用
※石灰化・狭窄が激しい根管にはグライドファイnderを使用



使用する製品	長さ
Dファイnder (010 02)	21mm
グライドファイnder (010 03-02)	25mm

予備拡大(グライドパス)

Pre 013を使用し予備拡大を十分に行うことで、拡大へのスムーズな移行を実現




ラジアルランド

切削点
特徴的な断面形状がファイルの急な引き込まれ、根管からの逸脱を軽減します。

使用する製品	長さ
JIZAI Pre 013 (013 04)	21mm
正回転 許容回転数:300min ⁻¹ 以下 トルク設定値:1.0N・cm以下	25mm

拡大

ファイルナンバーの順に従い使用する
・弱湾曲根管の場合は「JIZAI I・II・III」までの使用を推奨
・強湾曲根管の場合は「JIZAI I・II」までの使用を推奨

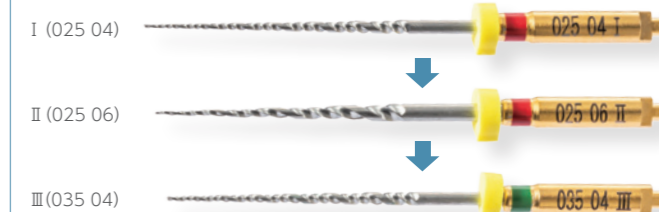

使用する製品	長さ
JIZAI I (025 04) / JIZAI II (025 06) / JIZAI III (035 04)	21mm
正回転 許容回転数:500min ⁻¹ 以下 トルク設定値:3.0N・cm以下	25mm

⚠️ パッキングモーションで使用する。・3~4回のパッキング、ファイルの交換ごとに洗浄・リキャプチャー(#10)を行う。・フルレンジ法で使用する。

JIZAI 製品ラインナップ マルチプルユース

規格		サイズ	テーパー	長さ	入数	標準価格
基本キット	I 	025	04	21mm 25mm	各1本入り	5,400円
	II 	025	06			
	III 	035	04			
単品		025	04	21mm 25mm	3本入	5,400円
		030	04			
		035	04			
		040	04			
		045	04			
		050	04			
		025	06			
		030	06			
	035	06				
Pre013		013	04	21mm 25mm	3本入	5,400円
オフィスオープナー		025	14	18mm	3本入	5,400円

医療機器認証番号:301ABBZX00035000 管理医療機器 一般の名称:電動式歯科用ファイル 販売名:マニー NiTiファイル

各部詳細

ラバーストッパーカラー ■18mm ■21mm ■25mm



カラーコード

■025 ■035 ■045
■030 ■040 ■050 ■Pre013

関連製品



Dファインダー

サイズ 08,10,12,15
長さ 21mm, 25mm

医療機器届出番号:09B1X00006011050
一般医療機器
一般の名称:歯科用ファイル
販売名:マニーDファインダー



グライドファインダー

サイズ 08,10,12,15
長さ 21mm, 25mm

医療機器届出番号:09B1X00006011010
一般医療機器
一般の名称:歯科用ファイル
販売名:マニーKファイル



デモ動画は
こちら

製造販売 **マニー株式会社**

〒321-3231 栃木県宇都宮市清原工業団地 8 番 3
【デンタル国内営業】Tel.028-667-8591 / Fax.028-667-8593

発売 **株式会社モリタ**

大阪本社 〒564-8650 大阪府吹田市垂水町 3 丁目 33 番 18 号
東京本社 〒110-8513 東京都台東区上野 2 丁目 11 番 15 号

Tel:06-6380-2525
Tel:03-3834-6161