

JIZAI製品ラインナップ マルチプルユース

| 規格 | サイズ | テーパー | 長さ | 入数 | 標準価格 |
|------------|-----|------|--------------|------|--------|
| グライドパスキット | | | | | |
| オリフィスオープナー | 025 | 14 | 18mm | 各1本入 | 5,400円 |
| Pre 013 | 013 | 04 | 21mm | | |
| Pre 020 | 020 | 04 | 25mm | | |
| シェイピングキット | | | | | |
| I | 025 | 04 | 21mm 25mm | 各1本入 | 5,400円 |
| II | 025 | 06 | | | |
| III | 035 | 04 | | | |

| 規格 | サイズ | テーパー | 長さ | 入数 | 標準価格 |
|------------|-----|------|--------------|-----|--------|
| 単品 | | | | | |
| オリフィスオープナー | 025 | 14 | 18mm | 3本入 | 5,400円 |
| Pre 013 | 013 | 04 | 21mm 25mm | | |
| Pre 020 | 020 | 04 | | | |
| 025 04 | 025 | 04 | | | |
| 030 04 | 030 | 04 | | | |
| 035 04 | 035 | 04 | | | |
| 040 04 | 040 | 04 | | | |
| 045 04 | 045 | 04 | | | |
| 050 04 | 050 | 04 | | | |
| 025 06 | 025 | 06 | | | |
| 030 06 | 030 | 06 | | | |
| 035 06 | 035 | 06 | | | |



医療機器認証番号：301ABBZX00035000 管理医療機器 一般的名称：電動式歯科用ファイル 販売名：マニー NiTi ファイル

サイズ識別

ラバーストッパーカラー ■18mm □21mm ■25mm

カラーコード ■Pre 013 ■Pre 020 ■025 ■030 ■035 ■040 □045 ■050

関連製品

Dファインダー

MANI D FINDERS
25mm #10

サイズ 08,10,12,15
長さ 21mm, 25mm

医療機器届出番号:09B1X00006011050
一般医療機器
一般的名称:歯科用ファイル
販売名:マニーDファインダー

グライドファインダー

MANI GLIDE FINDERS
25mm #10 03/02

サイズ 08,10,12,15
長さ 21mm, 25mm

医療機器届出番号:09B1X00006011010
一般医療機器
一般的名称:歯科用ファイル
販売名:マニーKファイル

より安全、より快適な、操作性の追求

JIZAI
— 自在 —
NiTiロータリーファイル



製造販売 **マニー株式会社**

〒321-3231 栃木県宇都宮市清原工業団地 8 番 3
【デンタル国内営業】 Tel.028-667-8591 / Fax.028-667-8593

発売 **株式会社モリタ**

大阪本社 〒564-8650 大阪府吹田市垂水町 3 丁目 33 番 18 号 Tel:06-6380-2525
東京本社 〒110-8513 東京都台東区上野 2 丁目 11 番 15 号 Tel:03-3834-6161


根管治療の悩みを解決するために

日々の治療において、より安全・より快適に使用できるファイルを追求め、私たちは「操作性」、「耐久性」、「追従性」をキーワードに「JIZAI」を開発いたしました。弯曲根管へのアプローチに信頼できるサポートを提供することが、皆さまの負担軽減と安心につながるように。

デザイン



引き込まれを大幅に軽減した操作性

番手によって適切な断面形状を付与しています。

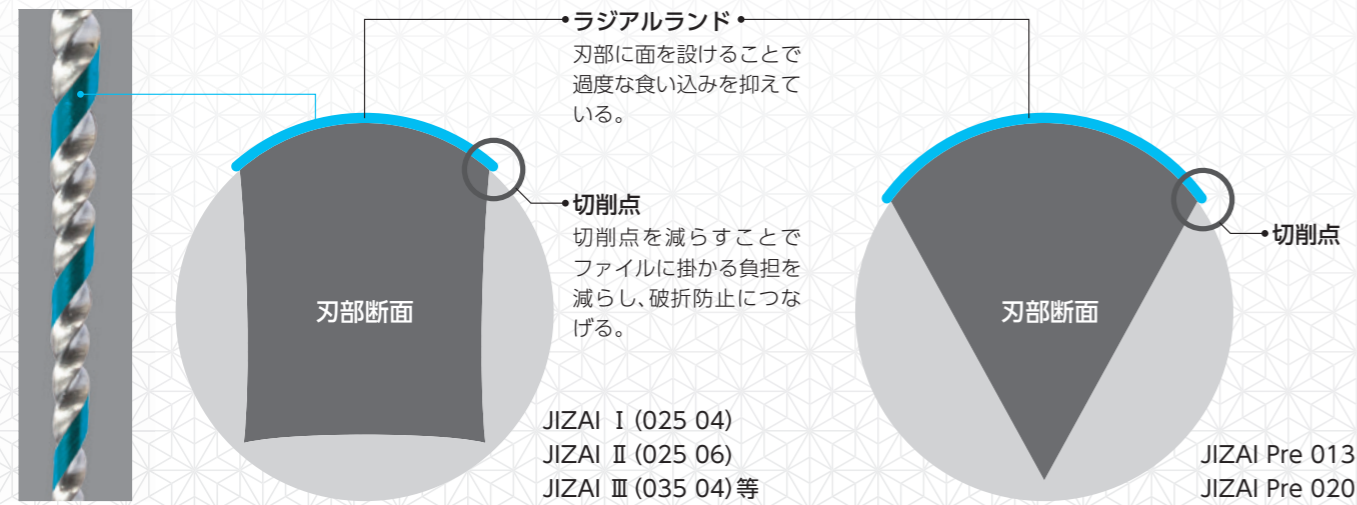


破折への不安解消を目指した耐久性

熱処理によって適切な柔軟性を付与しているため、疲労破折を起こしにくい。金属の模擬根管模型の中で、何回転すると折れるかという試験を行っている。(条件:500min⁻¹)

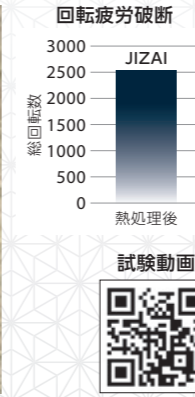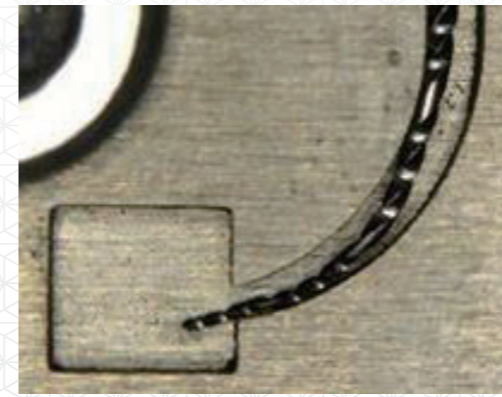

複雑根管の治療をサポートする追従性

複雑な形状でも外弯・内弯に偏らない形成をサポート。

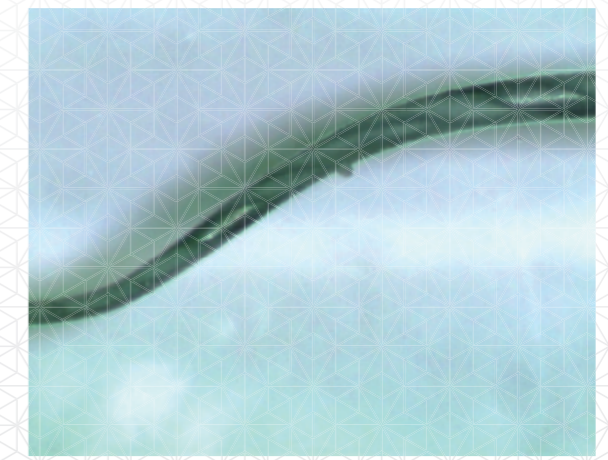

使用方法

STEP 1 ストレートラインアクセス

STEP 2 穿通

STEP 3 予備拡大

STEP 4 拡大形成

・パッキングモーションで使用する。
・ファイルの交換ごとに洗浄・リキャピチュレーション(#10)を行う。
・フルレンジス法で使用する。

STEP 1
ストレートラインアクセス
JIZAI オリフィスオープナー (025 14)
正回転 許容回転数:500min⁻¹以下 トルク設定値:3.0N・cm以下

STEP 2
穿通
D ファインダー (010 02)
または
グライドファインダー (010 03-02)
※ 石灰化・狭窄が激しい根管にはグライドファインダーを使用

STEP 3
予備拡大(グライドパス)
JIZAI Pre 013 (013 04)
正回転 許容回転数:300min⁻¹以下 トルク設定値:1.0N・cm以下
※OTRモード 回転数:300min⁻¹以下 トルク:1.0N・cm以下
石灰化・狭窄・弯曲した根管の場合
JIZAI Pre 020 (020 04)
正回転 許容回転数:500min⁻¹以下 トルク設定値:3.0N・cm以下
※OTRモード 回転数:500min⁻¹以下 トルク:1.0N・cm以下

STEP 4
拡大形成
JIZAI I (025 04) / JIZAI II (025 06) / JIZAI III (035 04)
正回転 許容回転数:500min⁻¹以下 トルク設定値:3.0N・cm以下
※OTRモード 回転数:500min⁻¹以下 トルク:1.0N・cm以下

I (025 04)
II (025 06)
III (035 04)